

Uusi

Uusi

Järjestelmän päähineitä

- ME- MultiCap "Base"
varustettu värillisiin kovetetusta muovista valmistetuin elektrodipitimin.
- MW- ... MultiCap "Soft"
varustettu pehmeästä, läpinäkyvästä silikonista elektrodipitimin.
- MC- ... MultiCap "Cup"
Käytettäväksi 10mm GVB-geliMED "Cup"-elektrodien kanssa.



Sovellus

Valmistelu

MultiCaps-tuotteiden yhteydessä työskennellessä elektrodit on asetettava hiomageelillä samalla tavalla kuin tavanomaisten päähineiden ja elektrodien yhteydessä.

Vastukset

Päähineen käyttäjäystävällisen designin ansiosta voit helposti valmistella elektrodit vaikka päähine olisi paikallaan.

Elektrodit

Korkealuokkaisia "Base"-, "Soft"- ja "Cup"-vakioelektrodeja voidaan käyttää kaikkien MultiCaps-tuotteiden yhteydessä (Base, Soft ja Cup).

Johdotus

Elektrodit voidaan kiinnittää helposti elektrodipitimiin käyttämällä vain vähän kevyttä puristusta. Pienet asentomerkitsijät varmistavat elektrodien nopean liittämisen päärasiaan.

Optimaalinen kontakti

Kaikilla elektrodityypeillä on optimaalinen pääsy (reikä tai lovi) elektrodien täyttämiseksi kontaktigeelillä tylsää neulaa käyttämällä. Tämä varmistaa puhtaan nauhoitussovelluksen mahdollisuuden.

Parannettu teknologia ja käyttäjäystävällinen design

Päähineen lisävarusteita

ME-17-AGCL-26 MCS-elektrodi, 100 cm kaapeli, 1,5 mm DIN-liitin.

MW-17-Z-26 Pehmeä elektrodi, 150 cm kaapeli, 1,5 mm DIN-liitin.

ME-20 10 "Base"-elektrodipidintä
MWE-20 10 "Soft"-elektrodipidintä
MCE-20 10 "Cup"-elektrodipidintä

ME-F-SET 23 "SET"-asentomerkitsijää

ME-23-L Leukahihna aikuisia varten
ME-23-S Leukahihna lapsia/vauvoja varten


ME-3-L Rintahihna aikuisia varten
ME-3-S Rintahihna lapsia/vauvoja varten

ME-13 Velcro-kiinnitys elektrodijohtoja varten.

OHR-EM-26 Välineistö sisältää mm. korvakiinnitinparin ja 2 yksittäistä elektrodia.

OHR-EM-H korvakiinnitinpari, ei sisällä elektrodeja

EEG-BOX-37 EEG-minirasia, 40 liitintä

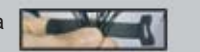

MULTI
CAP

Lisätietojen saamiseksi elektrodeista tai lisävarusteista ota yhteyttä meihin puhelimitse +49 (0) 4551 - 95 67 30 tai sähköpostitse info@gvb-gelimed.de GVB-geliMED-tiimi

GVB-geliMED E. Kfm.

Puh.: +49 (0) 45 51 - 95 67 30
Faksi: +49 (0) 45 51 - 95 67 33
info@gvb-gelimed.de

gvb gelimed
Yhteistyökumppanimme
lääkinnällisiä lisävarusteita varten

www.gvb-gelimed.com

MULTI
CAP

Parannettu teknologia ja
käyttäjäystävällinen design



MultiCap "Base"

MultiCap "Soft"

MultiCap "Cup"

Vapaasti asetettavia
elektrodein varustettuja
EEG System - Cap

gvb CAPS™

Järjestelmän päähineitä ja lisävarusteita

MULTI CAPBASE™

EEG-tekstiilipäähinejärjestelmä

Saatavana seuraavina kokoina:

XL	60 - 64cm	Aikuiset
L	54 - 60cm	Naiset/teini-ikäiset
M	48 - 54cm	Teini-ikäiset
S	42 - 48cm	Lapset
XS	36 - 42cm	Vauvat
1	30 - 36cm	Keskokset 1
2	26 - 30cm	Keskokset 2
3	22 - 26cm	Keskokset 3

Elektrodit

Sintratut MultiCap "Basic" -tuotteen Ag/AgCl-elektrodit takaavat minimin polaroinnin ja yhtenäiset tulokset pitkien mittauksen aikana. Elektrodit on helppo täyttää pientä sisennystä käyttäen. Liitäntä: 1,5 mm DIN-liitin.

Elektrodipitimet

MultiCap "Base" -elektrodipitimet on valmistettu kovetusta muovista ja takaavat pitkän kestoajan. Ne voidaan muuttaa vetämällä ne erilleen. Kaikki elektrodipitimet toimitetaan asentomerkitsijöin.

Käyttäminen:
Elektrodin asettaminen elektrodirunkoon.

Ylimääräiset elektrodit

MultiCap "Base" -vakioelektrodien lisäksi on tarjolla ylimääräisiä elektrodeja; tarjolla on myös korvakiinnikkeitä ja ne voidaan panna kokoon käyttämällä samoja elektrodeja kuin päähineessä.

Aloitustoimet!

Täysi MultiCap "Base"-järjestelmä:

- 3x MultiCap, tarjolla eri kokoja
- 25x Sintratut Ag/AgCl "MCS" -elektrodit varustettu 1,5 mm DIN-liittimellä
- 2x Sintratut Ag/AgCl-korvaelektrodit
- 1x Neulatarpeisto elektrodien täyttämiseksi geelillä
- 1x Johtava suolageeli, 250 gramman pullo
- 1x Ihoa valmisteleva tahna, 160 gramman pullo
- 1x Pään mittanauha
- 1x Puhdistuskärjet (100 kappaleen sarja)
- kaikki päähineet on varustettu elektrodipitimin ja leukahihnoin

MULTI CAPSOFT™

EEG-tekstiilipäähinejärjestelmä

Saatavana seuraavina kokoina:

XL	60 - 64cm	Aikuiset
L	54 - 60cm	Naiset/teini-ikäiset
M	48 - 54cm	Teini-ikäiset
S	42 - 48cm	Lapset
XS	36 - 42cm	Vauvat
1	30 - 36cm	Keskokset 1
2	26 - 30cm	Keskokset 2
3	22 - 26cm	Keskokset 3

Elektrodit ja liittimet

MultiCap "Soft" -elektrodit ovat saatavana valmistettuina sintratusta Ag/AgCl:stä tai tinasta.

Elektrodit on liitetty päärasiaan käyttämällä 25-napaista multiliitintä. Ylimääräiset elektrodit on varustettu 1,5 mm DIN-liittimellä.

Elektrodiringot

MultiCap "Soft" -elektrodipitimet on valmistettu pehmeästä silikonista mukavuuden varmistamiseksi. Elektrodipitimet voidaan vaihtaa yksinkertaisesti vetämällä ne ulos joustavasta tekstiilimateriaalista. Kaikki elektrodipitimet toimitetaan asentomerkitsijöin.

Käyttäminen:
Elektrodin asettaminen elektrodirunkoon.

Ylimääräiset elektrodit

Ylimääräisiksi elektrodeiksi suosittelemme Ag/AgCl- tai tinakorvaelektrodeita. (Huomioi: Kaikki elektrodit on valmistettava samasta materiaalista kuin sovelluksessa).

Aloitustoimet!

Täysi MultiCap "Soft"-järjestelmä:

- 3x MultiCap, tarjolla eri kokoja
- 22x SoftCap-elektrodit (21+1) valmistettu tinasta, 25-napainen multi-liitin
- 2x Tinakorvaelektrodit
- 1x Neulatarpeisto elektrodien täyttämiseksi geelillä
- 1x Johtava suolageeli, 250 gramman pullo
- 1x Ihon valmistelutahna, 160 gramman pullo
- 1x Pään mittanauha
- 1x Puhdistuskärjet (100 kappaleen sarja)
- kaikki päähineet on varustettu elektrodipitimin ja leukahihnoin
- 1x 1x Käyttöohje DVD

MULTI CAPCUP™

EEG-tekstiilipäähinejärjestelmä

Saatavana seuraavina kokoina:

XL	60 - 64cm	Aikuiset
L	54 - 60cm	Naiset/teini-ikäiset
M	48 - 54cm	Teini-ikäiset
S	42 - 48cm	Lapset
XS	36 - 42cm	Vauvat
1	30 - 36cm	Keskokset 1
2	26 - 30cm	Keskokset 2
3	22 - 26cm	Keskokset 3

Elektrodit

Kaikkia leimattuja GVBgeIIMED-"cup"-elektrodeja, halkaisija 10 mm, voidaan käyttää tämätyyppisen päähineen kanssa. Valmiit elektrodisarjat voidaan tallettaa, koska "cup"-elektrodeja voidaan käyttää erilaisiin sovelluksiin. "Cup"-elektrodit toimitetaan 1,5 mm DIN-liittimellä.

Elektrodiringot

MultiCap-"Cup"-elektrodipitimet on valmistettu muovista. Niissä on ruuvivarustus ja ne on helppo vaihtaa. Muovista pidintä käytetään asettamaan "cup"-elektrodit elektrodipitimeen. Kaikki elektrodiringot on varustettu asentoliipulla.

Käyttäminen:
Elektrodin asettaminen elektrodirunkoon.

Ylimääräiset elektrodit

Ylimääräisiksi elektrodeiksi suosittelemme Ag/AgCl- tai tinakorvaelektrodejamme. (Huomioi: Kaikki elektrodit on valmistettava samasta materiaalista kuin sovelluksessa).

Aloitustoimet!

Täysi MultiCap "Cup"-järjestelmä:

- 3x MultiCap, tarjolla eri kokoja
- 25x Cup-elektrodit (kulta tai Ag/AgCl) käyttämällä 1,5 mm DIN-liitintä
- 2x Korvaelektrodit (kulta tai Ag/AgCl)
- 1x Neulatarpeisto elektrodien täyttämiseksi geelillä
- 1x Johtava suolageeli, 250 gramman pullo
- 1x Ihon valmistelutahna, 160 gramman pullo
- 1x Pään mittanauha
- 1x Puhdistuskärjet (100 kappaleen sarja)
- kaikki päähineet on varustettu elektronipitimin ja leukahihnoin
- 1x DVD koskien "Cup-elektrodeja"