


Sistemas de gorros

- ME- MultiCap "Base"
con soportes de electrodos en colores fabricados con plástico endurecido.
- MW- ... MultiCap "Soft"
con soportes de electrodos fabricados con silicona blanda transparente.
- MC- ... MultiCap "Cup"
para utilizar con electrodos en forma de copa GVB-geliMED de 10 mm.



Accesorios del gorro

- ME-17-AGCL-26 (para gorro MCS) Electrodo MCS con cable de 100 cm, conector DIN de 1,5mm
- MW-17-Z-26 Electrodo blando con cable de 150 cm, conector DIN de 1,5mm.
- ME-20 10 soportes de electrodos "Base"
- MWE-20 10 soportes de electrodos "Soft"
- MCE-20 10 soportes de electrodos "Cup"
- ME-F-SET 23 marcadores de posición "SET"
- ME-23-L Correa de mentón para adultos
- ME-23-S Correa de mentón para niños/niños pequeños
- ME-3-L Correa de pecho para adultos
- ME-3-S Correa de pecho para niños/niños pequeños
- ME-13 Sujeción de Velcro para cables de electrodos.
- OHR-EM-26 Juego que incl. 1 par de clips de oreja y 2 electrodos sencillos.
- OHR-EM-H 1 par de clips de oreja sin electrodos.
- EEG-BOX-37 Caja Mini EEG con 40 conectores.

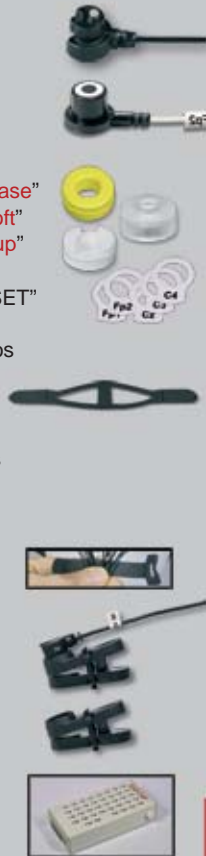

Aplicación



Preparación

Cuando trabaje con MultiCaps, es necesario colocar los electrodos con un gel abrasivo de la misma forma que con los gorros y electrodos convencionales.

Obstáculos

Gracias al diseño de fácil manejo del gorro, puede preparar fácilmente los electrodos, incluso cuando el gorro está puesto.

Electrodos

Los electrodos de alta calidad "Basic", "Soft" y los "Cup" estándar pueden utilizarse con cualquiera de los Multicapas (Base, Soft y Cup).

Cableado

Los electrodos pueden fijarse fácilmente en los soportes de electrodos con apenas una pequeña presión. Unos pequeños marcadores de posición aseguran una rápida conexión a la caja de la cabeza.

Contacto Óptimo

Todos los tipos de electrodos tienen un óptimo acceso (agujero o ranura) para llenar los electrodos con gel de contacto utilizando una aguja de punta roma. Esto asegura la posibilidad de una aplicación de registro limpia.

Tecnología mejorada y diseño de fácil manejo



Nuevo

Nuevo

MULTI CAP

Tecnología mejorada
diseño de fácil manejo



Sistemas de gorros EEG con electrodos de libre colocación

GVB-geliMED E. Kfm.

Tel.: +49 45 51 - 95 67 30
Fax: +49 45 51 - 95 67 33
info@gvb-gelimed.de



www.gvb-gelimed.com



Para más información sobre los electrodos o accesorios adicionales, póngase en contacto con nosotros en el +49 (0) 4551 - 95 67 30 o en info@gvb-gelimed.de

MULTI CAPBASE™

Sistema de gorro textil EEG

disponible en los tamaños siguientes:

XL	60 - 64cm	Adultos
L	54 - 60cm	Mujeres/Adolescentes
M	48 - 54cm	Adolescentes
S	42 - 48cm	Niños
XS	36 - 42cm	Niños pequeños
1	30 - 36cm	Bebés prematuros 1
2	26 - 30cm	Bebés prematuros 2
3	22 - 26cm	Bebés prematuros 3

Electrodos

Los electrodos sinterizados de Ag/AgCl del MultiCap "Base" garantizan una mínima polarización y resultados coherentes durante mediciones largas. Es fácil llenar los electrodos con gel utilizando la pequeña muesca.

Conexión: conector 1,5mm DIN

Soportes de electrodos

Los soportes de electrodos de MultiCap "Base" son de plástico endurecido y garantizan una larga vida útil. Pueden cambiarse tirando de ellos. Todos los soportes de electrodos tienen marcadores de posición.

Aplicación:

Colocación del electrodo en el cuerpo del electrodo

Electrodos adicionales

Además de los electrodos estándar de MultiCap "Base", también están disponibles clips de oreja y pueden montarse con los mismos electrodos que los del gorro.

Puesta en marcha!

Sistema completo MultiCap-"Base":

3x MultiCap, disponibles diversos tamaños.

todos los gorros tienen soportes de electrodos y correas de mentón.

- 25x Electrodos "MCS" de Ag/AgCl sinterizado con conector DIN de 1,5mm
- 2x Electrodos de oreja de Ag/AgCl sinterizado
- 1x Kit de aguja parra llenar los electrodos con gel
- 1x Gel conductivo salino, botella de 250g
- 1x Pasta de preparación de la piel, botella de 160g
- 1x Cinta de medición de la cabeza
- 1x Puntas de limpieza (juego de 100)

MULTI CAPSOFT™

Sistema de gorro textil EEG

disponible en los tamaños siguientes:

XL	60 - 64cm	Adultos
L	54 - 60cm	Mujeres/Adolescentes
M	48 - 54cm	Adolescentes
S	42 - 48cm	Niños
XS	36 - 42cm	Niños pequeños
1	30 - 36cm	Bebés prematuros 1
2	26 - 30cm	Bebés prematuros 2
3	22 - 26cm	Bebés prematuros 3

Electrodos y conectores

Los electrodos MultiCap "Soft" están disponibles en Ag/AgCl sinterizado o estaño.

Los electrodos están conectados a la caja de la cabeza con un multi-conector de 25 púas. Los electrodos adicionales están equipados con un conector DIN de 1,5mm.

Cuerpos de electrodo

Los soportes de electrodos de MultiCap "Soft" son de silicona para que sean cómodos. Los soportes de electrodos pueden cambiarse simplemente tirando de ellos y sacándolos del material textil flexible. Todos los soportes de electrodos tienen marcadores de posición.

Aplicación:

Colocación del electrodo en el cuerpo del electrodo

Electrodos adicionales

Como electrodos adicionales, recomendamos nuestros electrodos para oreja de Ag/AgCl o estaño. (Nota: todos los electrodos deben ser del mismo material que la aplicación).

Puesta en marcha!

Sistema completo MultiCap "Soft":

3x MultiCap, disponibles diversos tamaños.

todos los gorros tienen soportes de electrodos y correas de mentón.

1x DVD de instrucciones para el usuario

- 22x Electrodos SoftCap (21+1) de estaño con multi-conector de 25 púas.
- 2x Electrodos de oreja de estaño
- 1x Kit de aguja parra llenar los electrodos con gel
- 1x Gel conductivo salino, botella de 250g
- 1x Pasta de preparación de la piel, botella de 160g
- 1x Cinta de medición de la cabeza
- 1x Puntas de limpieza (juego de 100)

MULTI CAPCUP™

Sistema de gorro textil EEG

disponible en los tamaños siguientes:

XL	60 - 64cm	Adultos
L	54 - 60cm	Mujeres/Adolescentes
M	48 - 54cm	Adolescentes
S	42 - 48cm	Niños
XS	36 - 42cm	Niños pequeños
1	30 - 36cm	Bebés prematuros 1
2	26 - 30cm	Bebés prematuros 2
3	22 - 26cm	Bebés prematuros 3

Electrodos

Todos los electrodos de copa troquelados de GVB-geliMED con un diámetro de 10mm pueden utilizarse con este tipo de gorro. Puede ahorrarse juegos de electrodos completos, ya que los electrodos de copa pueden utilizarse para diferentes aplicaciones. Los electrodos de copa se presentan con un conector DIN de 1,5mm.

Cuerpos de electrodo

Los soportes de electrodos de MultiCap "Cup" son de plástico. Tienen fijaciones de tornillo y son fáciles de cambiar. Se utiliza un retén de plástico para situar los electrodos de copa en el soporte del electrodo. Todos los cuerpos de electrodos tienen un indicador de posición.

Aplicación:

Colocación del electrodo en el cuerpo del electrodo

Electrodos adicionales

Como electrodos adicionales, recomendamos nuestros electrodos para oreja de Ag/AgCl o estaño. (Nota: todos los electrodos deben ser del mismo material que la aplicación).

Puesta en marcha!

Sistema completo MultiCap "Cup":

3x MultiCap, disponibles diversos tamaños.

todos los gorros tienen soportes de electrodos y correas de mentón.

1 DVD sobre "Electrodos de copa"

- 25x Electrodos de copa (Oro o Ag/AgCl) con conector DIN de 1.5mm
- 2x Electrodos de oreja (Oro o Ag/AgCl)
- 1x Kit de aguja parra llenar los electrodos con gel
- 1x Gel conductivo salino, botella de 250g
- 1x Pasta de preparación de la piel, botella de 160g
- 1x Cinta de medición de la cabeza
- 1x Puntas de limpieza (juego de 100)