

GVB-geliMED E.Kfm
Ginsterweg 4 a
23795 Bad Segeberg

Tel.: 04551-956730
Fax: 04551-956733
e-mail: info@gvb-gelimed.de
<http://www.gvb-gelimed.de>

Rev.4/29.08.11

Verbindungskabel für Einmal-Cup-Elektroden

Anwendung:

Das Kabel mit der Einmal-Cup-Electrode (**1183AGCL10**) verbinden und versichern, dass ein gut sitzender Steckkontakt gewährleistet ist. Stecker in den Vorverstärker einstecken.

Reinigung: Kabel regelmäßig mit einem in einem milden Reinigungsmittel getränkten, feuchten Tuch abwischen.

Rückstände von Pasten oder Kochsalzlösung auf den Steckern, können mit einer weichen Bürste entfernt werden. **Darauf achten, dass die Stecker nicht in Flüssigkeiten getaucht werden (Korrosion in der Steckerkabelverbindung!)**

Desinfektion:

Wischdesinfektion mit einem in Krankenhäusern üblich verwendeten Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion

Lagerung: 10 bis +50Grad

Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80%

Garantie: Der Hersteller erklärt, dass dieses Produkt nach ISO 13485 sowie in Übereinstimmung mit 93/42 EWG hergestellt wurde.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung resultierend aus falscher Handhabung und sofern dieses Produkt für andere Zwecke als angegeben verwendet wird.

Entsorgung: nach den geltenden Regeln des Abfallproduktegesetzes für medizinische Produkte.

Achtung: Dieses Produkt darf ausschließlich mit den dazugehörigen Einmal-Cup-Elektroden verwendet werden.

ACHTUNG:

Kabel mit nicht! berührungsgeschützten 2/3/4mm Steckern dürfen nach dem Medizinproduktegesetz DIN 60601 /1.3.1996 nur noch in Verbindung mit Altgeräten an den dafür vorgesehenen EEG/EMG Vorverstärker angeschlossen werden.